

Orthopädische Sitzschalen/ Lagerungselemente

Art.-Nr.: AS.V.GR1/2/3, AS.M.GR1/2/3, SR.V.GR1/2/3, SR.M.GR1/2/3, S.M.001, S.V.001, R.M.001, R.V.001, MAT.SYS.001/2/3/4

DE: Gebrauchsanweisung



Die Gebrauchsanweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen. Beachten Sie alle Anweisungen.

Sehr geehrte/r Kunde/in,

durch Ihren Sanitätsfachhandel erhielten Sie eine individuell gefertigte Sitzschale oder ein individuell gefertigtes Lagerungselement. Bitte lesen Sie vor der erstmaligen Benutzung Ihres Hilfsmittels diese bereitgestellte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Diese orthopädische Sitzschale/ Lagerungselement ist ein individuell gefertigtes Hilfsmittel, dessen Einsatz ausschließlich einem therapeutischen Aspekt für den/die Benutzer/in dient. Eine weitere Verwendung außerhalb dieses Einsatzgebietes ist ausgeschlossen. Dieses Hilfsmittel ist nur für den/die in der technischen Dokumentation beschriebenen Benutzer/Benutzerin vorgesehen.

INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH:

Das Sitzchalensystem findet seinen Gebrauch nur in Verbindung mit dem Rollstuhl/ Sitzschalenuntergestell als Mobilitätshilfe, deshalb beachten Sie bitte vor der Benutzung, dass die Sitzschale fest in Ihrem Hilfsmittel montiert ist.

Betätigen Sie die Bremsen des Rollstuhls/ Untergestells, bevor der/die Benutzer/in in die Sitzschale gesetzt oder geliftet wird. Legen Sie Positionierungshilfen nach außen über den Schalenrand, so dass diese nicht unterhalb des Gesäßes liegen.

In vielen Fällen ist ein Nachpositionieren des/der Benutzers/in in der Schale notwendig, sodass das Becken durch die Rückenlehne gut unterstützt wird und die Oberschenkel maximal auf der Sitzfläche aufliegen.

Bekleidung sollte nach diesem Vorgang geglättet werden, um eine eventuelle Verletzung durch übermäßigen Druck zu umgehen.

Verschließen Sie die beiliegenden Positionierungshilfen.

Das Sitzchalensystem darf nicht im Auto für den Transport des Menschen eingesetzt werden, wenn dieses nicht nach Herstellervorgaben auf dem Untergestell montiert ist.

Die montierten Kopfstützensysteme dienen ausschließlich der Verbesserung der Kopfhaltung, sind jedoch nicht für den Transport im PKW geeignet.

Vor der erstmaligen Benutzung Ihrer Sitzschale oder Ihres Lagerungselements müssen Armlehnen, Kopfstütze und Positionierungshilfen durch den Fachhandel fachmännisch justiert werden.

Bemerken Sie ein Unwohlsein oder Druckprobleme bei dem/der Benutzer/in, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhandel zwecks Kontrolle des Systems. Eine unsachgemäße Veränderung des Hilfsmittels hat den sofortigen Garantieverlust zur Folge.

REINIGUNG / PFLEGEHINWEISE:

Ihre Sitzschale bedarf wie Ihre allgemeine Kleidung einer regelmäßigen Reinigung, auch um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Dafür ist es möglich, die abnehmbaren Stoffteile bei 30°C (Schonwaschgang) in der Waschmaschine mit handelsüblichem Waschmittel zu reinigen. Bei zu hohen Temperaturen besteht die Gefahr, dass der Stoff einläuft und damit die Passform zerstört wird. Um die Waschmaschine zu schonen, ist es ratsam, die Stoffteile mit einem Stoffbezug (z.B. Kopfkissenbezug) in die Trommel zu geben. Die Trocknung kann in der Nähe einer Heizung oder in einem trockenen Raum geschehen.

Die Kunststoff- oder Metallteile können mit Wasser und Seife (Neutralreiniger) abgewaschen werden.

Lederteile können Sie von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Lappen abreiben. Waschen trocknet das Leder aus und kann zu Materialbruch führen.

DESINFEKTION:

Eine Desinfektion der Sitzschale ist im Regelfall nicht notwendig, lediglich bei offenen oder nässenden Wunden. Ein Einsprühen der Sitzschale mit 70%igem Isopropylalkohol, 3%iger Wasserstoffperoxyd Lösung oder anderen Desinfektionsmitteln, wie z.B. Kodan- oder Dibromol-Spray, reicht bei genügend langer Einwirkzeit aus. Durch die Desinfektion ist es möglich, dass der Stoff ausbleicht. Ebenso können Lederteile durch Desinfektionsmittel ausgetrocknet werden, was die Funktion dieser Sitzschale aber nicht einschränkt.

ENTSORGUNG:

Um eine fachgerechte Entsorgung zu gewährleisten bitte wir Sie, diese Sitzschale zur Entsorgung im orthopädie-technischen Fachgeschäft abzugeben.

WIEDERVERWENDBARKEIT:



Das Medizinprodukt ist zum Gebrauch an einem/einer einzelnen Patienten/in für mehrere Anwendungen bestimmt und darf nicht an einem/einer anderen Patienten/in wiederverwendet werden.



OssTec GmbH
Pätzkamp 7, 49504 Lotte, Deutschland
Tel. +49 (5404) 99 433 - 10 / Fax +49 (5404) 99 433 - 15

Version 2021-03